



Ácido hialurónico para el tratamiento de la cistitis intersticial

Descripción

Biocyst es una solución de hialuronato sódico que reconstruye temporalmente la capa dañada de glicosaminoglicano (GAG).

Con este tratamiento se consigue aliviar el dolor y ayuda además a disminuir la necesidad urgente de orinar.

Características

El hialuronato sódico es la pieza clave para la creación de una capa protección extracelular, reemplaza temporalmente la capa de GAG y ayuda a reconstruir la pared de la vejiga:

- Reparando al GAG dañada
- Reconstruyendo la barrera de tejido de la orina
- Evitando el traspaso de soluciones potencialmente inflamatorias

Método de uso

Instilar BIOCYST en la vejiga después de que la orina residual se haya eliminado.

BIOCYST debe mantenerse en la vejiga durante un mínimo de 20 a 30 minutos.

Para un mejor tratamiento de la cistitis, se recomienda aplicar BIOCYST una vez a la semana durante un periodo de entre 4 a 12 semanas. Tras esto se recomienda instilar BIOCYST mensualmente hasta que los síntomas desaparezcan.



Características técnicas

Presentación	BIOCYST es una solución estéril, no pirogénica de hialuronato sódico en base isotónica estéril. Contiene Hialuronato de Sodio 40mg / 50ml
Envase	Solución en vial de 50ml
Material	Contiene hialuronato de sodio de origen fermentaon, Cloruro de Sodio, Fosfato disódico dihidrato de hidrógeno, Dihidrógeno fosfato de sodio monohidrato y agua para inyección.
Vida útil	3 años
pH	6.5 - 7.5
Almacenaje	Conservar alejado de la luz directa. Mantener entre 2°C - 25°C.

Your medical partner

T. 902 901 514 / +34 961 124 060
F. +34 902 506 033
www.imex.es

T. +351 707 502 000
F. +351 707 500 070
www.imex.pt

IMEX