

Cierre Radial

Hemostasia bajo control

Sistema de compresión de arteria radial para cardiología intervencionista

Descripción

- Sistema de compresión e interrupción del sangrado seguro y cómodo.
- Especialmente diseñado para la hemostasia de la arteria radial tras una punción percutánea.

Características

- La transparencia del material asegura un control visual del procedimiento hemostático.
- Flexibilidad y longitud ajustable.
- Dispone de válvula lateral de conexión estanca "Luer-Lock" facilita el inflado-desinflado con cualquier jeringa convencional.

Uso

- Se recomienda inyectar 18 ml de aire.
- Se recomienda realizar presión alrededor de 8-10h. Si es necesario, se puede extender más de 10h.
- Si se observa hemorragia, inyecte aire hasta que se detenga.

Modelos Disponibles

Referencia	EAN	Volumen Balón (ml)
SH-PB04	6930197843033	20



Your medical partner

T. 902 901 514 / +34 961 124 060
F. +34 902 506 033
www.imex.es

T. +351 707 502 000
F. +351 707 500 070
www.imex.pt

IMEX.